

特集保存版 ニュース！
Select carefully and introduce
a new product

It's news!

Hello!! It is suggestion from Daikisystem.

Vol. 26 2026 August

電気不要の段差解消リフト 足踏み式「ゼロハイリフト」

Zero High LIFT [ZHW-150]



どこへでも持ち運んで使用できる!!

- ・足踏み式で電源いらず
- ・車輪付きだから運搬可能据置式
- ・介護保険レンタルOK
- ・昇降100～680mm



手すり(1本)
2本目からはオプション
(後付け可能)

折りたたみ可能なアウトリガー
昇降時に開いて使用することで安定します。また下部にねじ式調整が付いているため軽微な傾斜でも平行を保つことができます。




移動用キャスター
折りたたみ時の持ち運びが容易です。



スロープ 兼 落ち止め
W127×D500サイズの差し込み式
スロープとしては挿す角度を変える
ことで使用できます。

折りたたみ可能

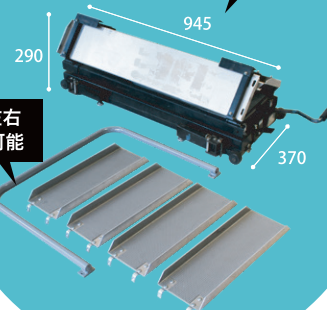


手すりは左右
入れ替え可能

油圧ジャッキ

上昇用 足踏みペダル 兼
移動用ハンドル(取り外し可能)
踏み込み回数に応じて上昇します。折りたたみ
時はハンドルとして使用。取り外し可能です。

下降ペダル
踏み込んでいる間に下降します

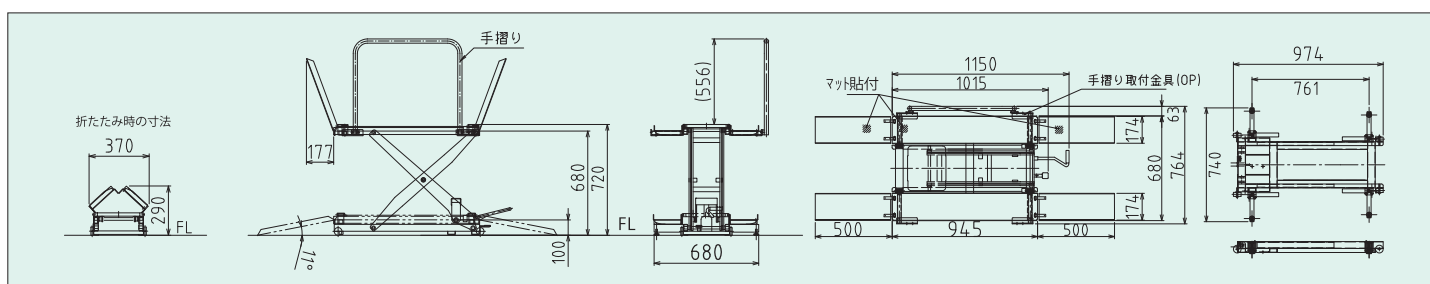

ZHW-150 PRODUCT SPEC

型 式	 ZHW-150	テーブル高さ	 H100-680
定 員	 1名	テーブル寸法	 W680×D945
対象車いす	 標準型車いすのみ ※1	外 形 寸 法	 図面参照
使用 方 法	 移動式	そ の 他 寸 法	 W370×D1025×H290 (折りたたみ時)
屋 外 使用	 ○	自 重	 44.5kg
駆 動 式	 足踏み油圧ジャッキ式	挟み込み防止	 -
消費電力	 なし	介護保険レンタル	 対象
最大積載量	 150kg		

標準付属品 手すり(1本)、スロープ兼落ち止め、上昇用 足踏みペダル 兼 移動用ハンドル
OPTION 手すり(2本目)、延長ブリッジ

※1 リクライニング型および電動車いす・積載面から大幅にはみ出る車いすは使用できません。
また許容荷重を守ってご使用ください。



※写真は旧式のもので

〈据付での利用〉

車椅子で室内より直接外に出られるよう設置。庭が狭いため、また使用頻度が少ないため、移動式のZHW-150を固定式として使用。乗り込み時の安定感を増すため、オプションとして手すりを取り付けた。



※写真は旧式のもので

〈移動式で車いす以外にも多目的に使用〉

新たに専用の出入口を作り、リフトを設置した。雨対策として、移動用のZHW-150を採用。これによって不用の時は倉庫に格納しておくことができ、またどこでも使用出来るので、多目的に使用している。

<https://daikisystem.jp> E-mail: info@daikisystem.jp

HANAOKA

DAIKI SYSTEM